



# PRODUKTSPEZIFIKATION



## PRODUKTSPEZIFIKATION

**Produkt:** SALVEQUICK EXTRA GROSSER  
FINGERSPITZEN-  
TEXTILWUNDSCHNELLEVERBAND  
(PFLASTER)  
**Referenznummer:** 6454



### 1. Allgemeine Beschreibung

Fingerspitzen-Wundschnellverband in einer Refill-Pappverpackung.  
Die Refill-Verpackung passt in den Cederroth (Salvequick) Spender für  
Wundschnellverband.

Der Wundschnellverband besteht aus einer Textil-Außenschicht mit einer  
ebenenmäßigen Klebebeschichtung. Zentral auf dem Verband ist ein absorbierendes  
Kissen befestigt. Auf der Klebeschicht befindet sich eine abziehbare Folie, die  
aus zwei sich teilweise überlappenden Teilen besteht. Beim Herausnehmen des  
Wundschnellverbands aus der Verpackung bleibt ein Teil der abziehbaren  
Kunststofffolie darin zurück. Eine Hälfte des Verbands kann nun mit nur einer  
Hand auf die Haut appliziert werden. Anschließend kann der andere Teil der  
abziehbaren Folie entfernt und der Wundschnellverband vollständig angebracht  
werden.

### 2. Verwendungszweck

Der Wundschnellverband dient als mechanische Barriere und zur Absorption von  
Exsudaten aus kleineren Wunden.

### 3. Technische Beschreibung

#### **Produktabmessungen**

|         |                     |               |
|---------|---------------------|---------------|
| Verband | Wundschnellverband: | 87x58 (23) mm |
|         | Wundkissen:         | 15x39 mm      |

#### **Material**

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Außenschicht         | Elastisches, hautfarbenes Textilgewebe                |
| Klebeschicht         | Hypoallergene Klebeschicht mit Schmelzklebstoffen     |
| Wundkissen           | Trockenes Nadelvlies mit einer Wundkontaktschicht     |
| Aufzulegende Schicht | Einseitig silikonisiertes abziehbares<br>Papier/Folie |
| Verpackung           | Kaltsiegel-Verpackung ohne Aufdruck                   |



# PRODUKTSPEZIFIKATION



## 4. Zusammensetzung

### **Refill**

| <u>Ref #</u>                | <u>Produkt/Material</u>                                 | <u>M.</u>     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 45164180                    | Extra großer Fingerspitzen-<br>Textilwundschnellverband | 15            |
| Abmessungen (L x B x H) mm: |                                                         | 30 x 87 x 100 |

### **Konsumentenverpackung**

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Anzahl Refills in der Transportverpackung: | 6              |
| Abmessungen (L x B x H) mm:                | 100 x 150 x 90 |

### **Transportverpackung**

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Anzahl Konsumentenverpackungen in der Transportverpackung: | 10              |
| Abmessungen (L x B x H) mm:                                | 520 x 160 x 190 |
| Gewicht (kg):                                              | 2,18            |

## 5. Kennzeichnung

### **Produkt (Refill)**

Cederroth-Adresse, Telefon- und Faxnummer  
Produktname, Referenznummer  
Chargennummer, Verfalldatum, EAN-Code  
Symbole: CE, DO NOT REUSE, LOT, USE BY

### **Transportverpackung**

Cederroth-Adresse, Telefon- und Faxnummer, Webadresse  
Produktname, Referenznummer  
Chargennummer, Verfalldatum, EAN-Code  
Menge

### **Konsumentenverpackung**

Cederroth-Adresse, Telefon- und Faxnummer, Web- und E-Mail-Adresse  
Produktname, Referenznummer  
Chargennummer, Verfalldatum, EAN-Code  
Menge  
Symbole: CE, LOT, USE BY

## 6. Lagerbedingungen

Das Produkt sollte zum höchstmöglichen Schutz bis zur Verwendung in der Originalverpackung gelagert werden.  
Haltbarkeit: 5 Jahre ab Produktionsdatum

## 7. Zubehör

Folgendes Zubehör kann mit dem Produkt verwendet werden:  
Ref #: 1907 Salvequick Pflasterspender

**Genehmigt von:** Teija Ålander  
Qualitätssicherungsmanagerin

Datum: 1.2.2008